

Digitālais alkometrs Platinum PROFI

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Saistību atruna

Digitālais alkometrs ir paredzēts tikai orientējošu rezultātu iegūšanai. Šī ierīce nav paredzēta diagnostiskiem vai medicīniskiem mērījumiem. Alkometrs uzrāda iespējamo alkohola daudzumu Jūsu izelpā – tas nevar tikt izmantots kā vienīgais reibuma pakāpes noteikšanas avots lai noteiktu vai ir droši vadīt auto, uzraudzīt iekārtas vai veikt citas darbības, kas prasa augstu reakcijas ātrumu un uzmanību.

Cilvēka organisma reakcija uz alkoholu ir atšķirīga – pat ja alkohola satura mērījums izelpā ir neliels, tas nenozīmē, ka Jūsu reakcija un uzmanības līmenis nav pasliktinājušies. Atcerieties, ka jebkura daudzuma alkohola lietošana ietekmē Jūsu reakcijas ātrumu un refleksus.

Vispārējs apraksts

Šis alkometrs ir izstrādāts alkohola satura noteikšanai Jūsu ķermenī. Ierīce ir apgādāta ar ļoti jutīgu sensoru, tai ir moderns dizains un neliels izmērs, kas nodrošina ērtu lietošanu un uzglabāšanu. Ja alkohola līmenis Jūsu izelpā pārsniegs normu – ierīce Jūs brīdinās ar audio un vizuālu brīdinājuma signāliem.

Ierīces apraksts

Progresīvais pusvadītāja alkohola sensors.

Ātra mērījumu veikšana.

Gudrā MCU kontrole.

Tūlītēja rezultātu uzrādīšana LCD displejā.

Digitālais LCD displejs ar zilu apgaismojumu.

Moderns dizains un neliels izmērs.

Audio brīdinājuma signāls, ja alkohola līmenis pārsniedz normu.

Sensora kļūdu meklēšanas sistēma.


Zemas bateriju jaudas indikators.

Ierīces sastāvdaļu apraksts

1. Sensora atvere.
2. Skaņas signāla atvere.
3. Ieslēgšanas slēdzis.
4. Ārējās barošanas ligzda.
5. LCD displejs.
6. Ventilācijas atvere.



Ierīces displeja apraksts

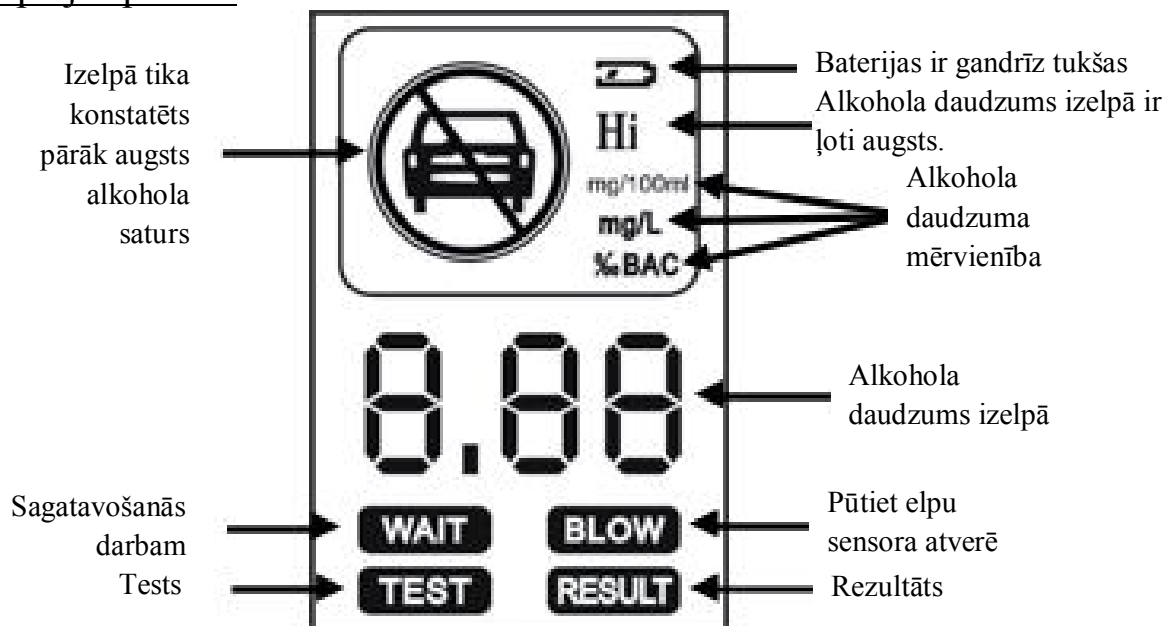

8.88	Alkohola daudzums
Displejs rāda "C"	Sagatavojaties pūst elpu sensora atverē
Displejā parādās "-"	Alkohola koncentrācijas analīze, lūdzu, uzgaidiet!
FFF	Sensora kļūda

Alkometra lietošana

1. Atveriet bateriju nodalījumu un ielieciet baterijas. Atcerieties, ka baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu apmēram 3 sekundes – alkometra displejs iegaismosies un Jūs izdzirdēsiet skaņas signālu. Displejā parādīsies uzraksts: „WAIT” – kas nozīmē, ka alkometrs gatavojas mērījumam.

Piezīme: laika atskaite ir no alkohola satura pēdējā mērījuma laikā – jo augstā bija koncentrācija, jo lēnāk notiks laika atskaite un otrādi.

3. Displejā sāksies laika atskaite – no 100 līdz 000, tad parādīsies skrejošs burts: "C" un uzraksts: „BLOW” – šajā brīdī ievelciet dziļi elpu un pūtiet sensora atverē, līdz izdzirdat audio signālu. Audio signāls nozīmē, ka ierīce ir beigusi mērījumu.
4. Displejā parādīsies uzraksts „TEST”, tas nozīmē, ka ierīce analizē iegūtos datus. Rezultāts būs redzams apmēram 8 sekundes, tad Jūs izdzirdēsiet skaņas signālu un alkometrs automātiski izslēgsies.
5. Ja vēlaties veikt atkārtotu mērījumu – atkārtojiet procedūru vēlreiz.

Uzmanību! Sargājiet alkometri no krišanas un stipriem triecieniem. Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu alkometrā.

Galvenie tehniskie parametri

Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103807818

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

- Sensora tips: Progresīvais pusvadītāja alkohola sensors
- Mērījumu amplitūda: 0.00 līdz 2,00%, 0,00 līdz 1,00g/l.
- Mērījumu solis: 0,01%
- Mērījuma precizitāte: $\pm 10\%$
- Apkārtējās vides temperatūra: 10-50°C.
- Izmēri: 103x65x27mm.
- Svars: 65g (bez baterijas).
- Displejs: 3 zīmju LCD displejs ar zilu apgaismojumu.
- Darbību nodrošina trīs 1.5V AAA baterijas.
- Mērījumu skaits bez bateriju nomaiņas: līdz 200 mērījumiem (atkarībā no bateriju veida).

Iespējamās problēmas, to risinājumi:

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
LCD displejs ir melnā krāsā	Nepareizi ievietotas baterijas	Ievietojiet baterijas pareizi ievērojot polaritāti
	Baterijas ir tukšas	Ievietojiet jaunas (pilnas) baterijas.
	Ierīce ieslēdzas uz īsu brīdi	Sazinieties ar ražotāju
Neparādās mērījumi	Mērījums vēl līdz galam nav veikts	Sagaidīt līdz mērījums tiek pilnībā pabeigts
	Ierīce ieslēdzas uz īsu brīdi	Sazinieties ar ražotāju
Displejā parādās FFF ierīce izslēdzas	Sensora kļūda	Sazinieties ar ražotāju
Uz displeja parādās indikators, baterija ir gandrīz tukša, un ierīce izslēdzas.	Baterijas ir tukšas	Ievietojiet jaunas (pilnas) baterijas

Produktu uzlabošana ir pastāvīgs process – tāpēc mēs paturam tiesības mainīt produktu izskatu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību!

- Uzglabājiet alkometru vietā, kur tas ir pasargāts no triecieniem un cita veida bojājumiem.
- Tūlītēja alkometra lietošanā pēc liela alkohola daudzuma uzņemšanas vai smēķēšanas var novest pie jūtīgā sensora sabojāšanas. Šādos gadījumos, pirms testa veikšanas, mēs iesakām nogaidīt apmēram 15 minūtes.
- Sargājiet ierīci no mitruma un ūdens.
- Sargājiet ierīci no kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
- Uzglabājiet ierīci vietā, kur nav šķīdinātāju vai citu ķīmikāliju izgarojumu, jo tie var bojāt ierīces sensoru.
- Ievietojiet baterijas ir pareizā polaritātē, lietojiet viena veida alkaline baterijas.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros, ekstrēmi augstā un zemā temperatūrā.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces atbilstošo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Importēts no Čehijas Republikas